

## **Instrukcja kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem z użyciem krążków Sporalu S.**

1. Z aluminiowego opakowania wyjąć papierowe torebki z krążkami Sporalu S.  
**Nie wyjmować krążków Sporalu S z papierowych torebek.**
2. Papierowe torebki z krążkami Sporalu S umieścić w szklanych naczyniach (jedna torebka z krążkiem Sporalu S w jednym naczyniu).
3. Naczynia z papierowymi torebkami z krążkami Sporalu S umieścić na półkach w urządzeniu sterylizującym. Na każdej z półek można umieścić więcej naczyń z krążkami Sporalu S, ustawiając je w różnych miejscach na półce.
4. Jedną papierową torebkę z krążkiem Sporalu S (tej samej serii, co umieszczone w urządzeniu sterylizującym) zachować jako kontrolny krążek Sporalu S, **nie umieszczać jej w urządzeniu sterylizującym.**
5. Przeprowadzić sterylizację urządzeniem sterylizującym w oparciu o wymagania aktualnej FP (minimalna temperatura 160°C utrzymywana co najmniej przez 2 godziny).
6. Po zakończeniu procesu sterylizacji każdą papierową torebkę z krążkiem Sporalu S oddzielnie zapakować, zachowując zasady jałowości ( np. za pomocą jałowej pęsety, do np. jałowego pojemnika na mocz), a opakowania opisać.

Na opakowaniu zawierającym papierową torebkę z krążkiem Sporalu S powinny znaleźć się poniższe informacje:

- Numer serii krążka Sporalu S
- Data ważności krążka Sporalu S
- Miejsce w sterylizatorze, w którym krążek Sporalu S był umieszczony:

Przykładowe oznakowanie:

**PG** – półka górna

**PŚ** – półka środkowa

**PD** – półka dolna

**K** – kontrolny krążek Sporalu S (nie został poddany sterylizacji).

7. Dokładnie opisane opakowania, zawierające papierowe torebki z krążkami Sporalu S, dostarczyć wraz ze zleceniem wykonania badania skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem z użyciem krążków Sporalu S, do Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie w ciągu **24 godzin** od sterylizacji.